

# Gebrauchsanweisung - Schuheinlagen

## Sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein Paar anatomische Schuheinlagen erhalten. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung genau durch. Ihre Einlagen sind speziell für Sie angefertigt worden. Die Benutzung der Einlagen im Wasser und das Legen in Säuren oder Lösungsmitteln sind zu vermeiden. Bitte erwärmen Sie die Einlagen nicht über 50° Celsius. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Tragezeiten der Einlagen.

### Ihrer Gesundheit zuliebe

Bei täglichem Tragen und Waschen lässt der medizinische Druck nach etwa 6 Monaten nach. Um den erfolgreichen Therapieverlauf zu sichern, besteht die Möglichkeit, bei medizinischer Notwendigkeit eine Folgeversorgung zu erhalten.

### Tragezeiten

Bitte beginnen Sie langsam. Am ersten Tag eine Stunde. Am zweiten Tag auf zwei bis drei Stunden steigern. Das Ziel ist nach ca. einer Woche die Einlagen etwa einen halben Tag zu tragen und später evtl. den ganzen Tag (Je nach Patient / Diagnose).

### Reinigung / Desinfektion

Nach jeder Nutzung der Einlagen zu lüften entnehmen. Lederbezogene Einlagen bitte mit einem feuchten Tuch abwischen. Kunststoffeinlagen mit Wasser und Seife reinigen. Bei offenen Blasen können Sie die Einlagen mit Sagrotan oder Kodan-Spray desinfizieren.

Erhalten Sie Schuheinlagen zum ersten Mal, steigern Sie die ersten 3 Tage die Tragezeit vorsichtig. Ihre Füße müssen sich erst an die Einlagen gewöhnen. Im Schuh eingeklebte Fußstützen oder Bettungen müssen vor dem Einlegen der Einlagen entfernt werden. Wenn Druckstellen, Rötungen oder Allergien durch das Tragen auftreten sollten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

### Wartung

Um die Garantieleistungen, ein halbes Jahr ab Abholung, einhalten zu können, sollten Sie zu einer halbjährigen Kontrolle vorsprechen. Unsere Haftung erstreckt sich ausschließlich auf das Produkt in der von uns abgegebenen Form. Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit unserem Fachpersonal in Verbindung.

### Entsorgung

Einlagen sind Sondermüll. Sie dürfen aber auch bei uns zurückgegeben werden.

***Wir wünschen Ihnen viel Freude und einen guten Therapieerfolg mit Ihren neuen Einlagen.***

### Hinweis

Bei unsachgemäßer Handhabung oder Veränderung am Produkt wird keine Haftung übernommen. Sollte die Leistung nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.